


Jak nakładać i zdejmować niejałowe rękawice

Przed zakładaniem jak i po ściągnięciu rękawic należy przeprowadzić czynności higieny rąk odkażając ręce preparatem na bazie alkoholu lub myjąc je mydłem i wodą.

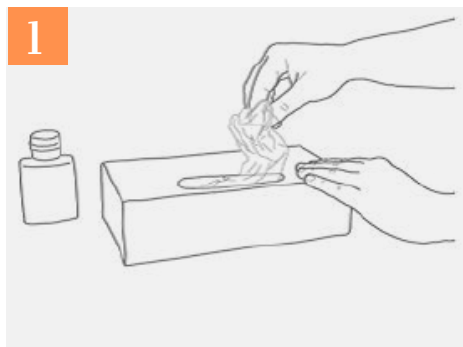

1 Wyjmij rękawice z oryginalnego opakowania.



2 Dotknij jedynie ograniczoną powierzchnię rękawicy w części nadgarstka.



3 Nałóż pierwszą rękawicę.




4 Wyjmij drugą rękawicę gołą ręką dotykając jedynie ograniczonej powierzchni rękawicy.



5 Aby uniknąć dotknięcia skóry przedramienia, odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami ręki w rękawicy umożliwiając nałożenie drugiej rękawicy.




6 Po nałożeniu rękawic, nie należy dotykać rękami niczego, co nie zostało określone we wskazaniach rękawic.

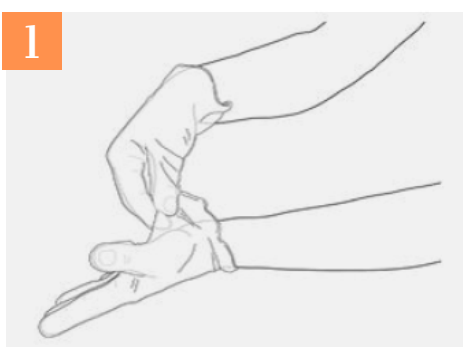

1 Aby zdjąć rękawicę chwyć palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka, aby ją zdjąć nie dotykając skóry przedramienia i ściągnij ją z ręki wywracając wewnętrzną stronę na wierzch.



2 Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce, włóż palce drugiej ręki między rękawicę a nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zawijając ją wzdłuż dłoni a następnie naciągnij ją na trzymaną w palcach rękawicę.

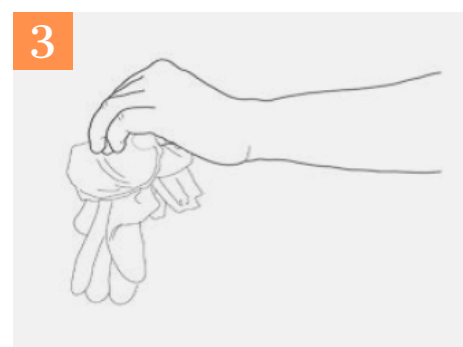

3 Wyrzuć zdjęte rękawice. Pamiętaj o wykonaniu czynności higieny rąk myjąc ręce mydłem z wodą lub preparatem dezynfekujący.